



Instructie gebruik mond-neusmasker

WESTERHOLM

Zet het mond- neusmasker op volgens onderstaande instructie s.v.p.

U pakt de volgende benodigdheden:

1. Een chirurgisch mondkapje
2. Een plastic zakje

Het mond-neusmasker opzetten



Desinfecteer uw handen met handalcohol.



Plaats het masker op uw gezicht (elastiekjes om de oren of de touwtjes op het achterhoofd).



Zorg dat het masker uw mond, neus en kin bedekt.



Druk het plastic/ metalen brugje over uw neus. Raak verder de voorkant van het masker niet meer aan.

Het mond-neusmasker afzetten



Verwijder het masker door het aan de elastiekjes/touwtjes vast te pakken. Raak de voorzijde van het masker niet aan.



Gooi het masker weg in de prullenbak.



Desinfecteer uw handen met handalcohol.

- Draag het mondkapje maximaal drie uur achter elkaar, daarna pakt u een nieuwe. Het gebruikte mondkapje deponert u in de daarvoor aangewezen afvalbak bij de ingang.
- Gebruik bij voorkeur geen consumpties tijdens uw bezoek. Gebruikt u toch een consumptie handel dan volgens de instructie hoe het mondkapje af te zetten en bewaar deze tijdelijk in het daarvoor bestemde plastic zakje.

Let op! Raak het kapje nooit aan anders dan bij het elastiekje achter uw oren.